
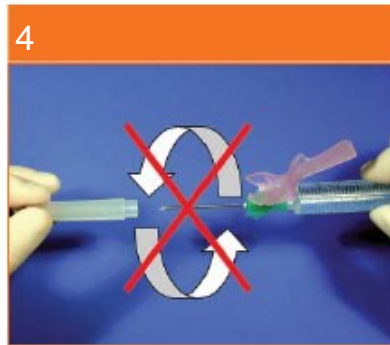


BD Eclipse™

Aguja Hipodérmica de Seguridad Tecnología SmartSlip™

Recomendaciones de Uso con jeringas Luer

Inyección

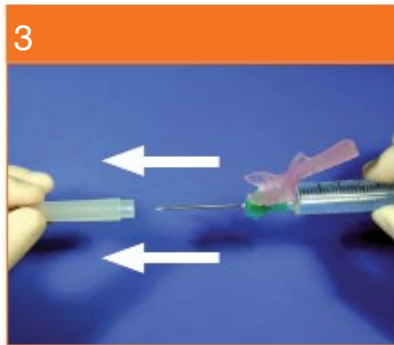

1. Conecte firmemente la aguja hipodérmica de seguridad BD Eclipse™ a una jeringa con conexión Luer hasta oír un clic – Conexión segura JERINGA + AGUJA. FOTO 1
2. Retire el protector rosa hacia atrás para facilitar la visualización de la escala de graduación. FOTO 2
3. Sujete la jeringa con una mano y retire el capuchón protector de la aguja con la otra mano con cuidado. FOTO 3
4. No gire el capuchón durante su retirada. FOTO 4

El protector rosa está SIEMPRE orientado con la posición del bisel de la aguja, permitiendo así realizar inyecciones, incluso de bajo ángulo (intradérmicas).

ACTIVACION DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

5. Al finalizar la inyección, apoye el dedo pulgar o índice sobre la zona rugosa y ancha del protector rosa. FOTO 5
6. Presione hasta oír un clic – Activación segura e irreversible del DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. FOTO 6

Deseche jeringa y aguja en un contenedor de objetos cortopunzantes apropiado.



BD Medical
Camino de Valdeoliva, s/n
28750 San Agustín de Guadalix
(Madrid)
T: (+34) 918488100
F: (+34) 918488103
www.bd.com